

### FAQ

---

#### Was ist BIA\*?

BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse) ist eine seit 30 Jahren eingesetzte und wissenschaftlich abgesicherte Messmethode zur Bestimmung der Körperzusammensetzung. Dabei wird ein schwacher Strom durch den Körper geschickt und über die gemessenen Widerstände die Anteile an Wasser, Muskulatur und Körperfett ermittelt.

#### Warum InBody?

InBody steht weltweit seit Jahren für unübertroffen präzise und einfache Analyse der Körperzusammensetzung mittels einer weiterentwickelten BIA-Technologie. Damit gelingt es InBody als einzigem Anbieter auch z. B. Sportler, Senioren und übergewichtige Personen verlässlich zu messen. Sie erhalten innerhalb von einer Minute ein exaktes Gesundheitsprofil und können dank fundierter Ergebnisse fachkundig beraten.

#### Was unterscheidet InBody von anderen Herstellern?

Empirische Berechnungsfaktoren wie Alter, Geschlecht oder Körpertyp führen insbesondere bei Übergewichtigen, Senioren oder muskulösen Personen zu verfälschten Ergebnissen. InBody verzichtet als einziger Hersteller auf dem Markt auf die Einbeziehung von Schätzungen und bietet damit eine unvergleichbar exakte Analyse. Zudem misst der InBody die Körperzusammensetzung direkt-segmental, d. h. Sie erhalten separate Ergebnisse für den Rumpf, linkes und rechtes Bein, sowie den linken und rechten Arm. Der InBody ist das einzige BIA-Gerät das den Rumpfbereich zuverlässig messen kann.

#### Wie kann ich InBody im Studio einsetzen?

Schon vom ersten Kundenkontakt kann der InBody als Instrument der Kundengewinnung eingesetzt werden. Z. B. kann dem potentiellen Kunden durch eine InBody Messung beim ersten Probetraining veranschaulicht werden, welche individuelle Trainingsmethode sinnvoll ist und auf was für ein Angebot sie/er im Studio zurückgreifen kann.

#### Vertriebspartner

JP Global Markets GmbH  
Mergenthalerallee 55 – 59, 65760 Eschborn  
Tel.: 06196 – 7691665, Fax: 06196 – 7691611  
E-Mail: [erfolg@inbody.de](mailto:erfolg@inbody.de)  
[www.inbody.de](http://www.inbody.de)

## Neue Wege der BIA\*-Körperzusammensetzungsanalyse

\* BIA – Bioelektrische Impedanzanalyse



# Erfolge werden sichtbar.

**Warum soll ich für den InBody ein Vielfaches von dem bezahlen, was eine Fettwaage kostet?**

Der InBody ist wesentlich mehr als eine Körperfettwaage. Er ist ein präzises Messinstrument, das umfangreiche und verlässliche Ergebnisse liefert. Somit ist eine regelmäßige und die Mitgliedschaft des Kunden begleitende Trainingskontrolle effektiv möglich. Das Trainerpersonal kommt nicht durch widersprüchliche Ergebnisse – hervorgerufen durch unpräzise Messungen – in Erklärungsnot. Insbesondere die Darstellung der Veränderung von Muskel-/Fettanteilen in den einzelnen Segmenten bei gleichbleibendem Gesamtgewicht sind wichtige Parameter, die zur Motivation und zum eigenen Körperverständnis beitragen. Darüber hinaus kann InBody im Rahmen von Gesundheitsleistungen und Präventionsangeboten als zentrales Instrument eingesetzt werden, da durch die umfangreichen Messparameter Gesundheitsrisiken und Entwicklungen im Zeitverlauf aufgezeigt werden können.

**InBody als Kundenbindungstool**

Aufgrund der Reproduzierbarkeit und Genauigkeit der Messung können Trainingsfortschritte und tatsächliche Veränderungen in der Körperzusammensetzung exakt dokumentiert werden. Insbesondere bei Kunden, die abnehmen wollen oder Muskulatur aufbauen wollen, ein unschlagbares Argument. Aufgrund der individuellen Fitnessbewertung des Kunden mittels eines Punktesystems kann der InBody für studiotinterne Marketingmaßnahmen eingesetzt werden. Z. B. erhält das Mitglied, das seinen Fitnesswert in 4 Wochen am stärksten steigern kann, 30,- EUR Freiverzehr an der Bar o. ä.

**InBody als Kundengewinnungstool**

Der ausführliche Befundbogen unterstreicht gegenüber Interessenten, dass Sie mit Ihrer Anlage ein kompetenter Gesundheitsanbieter sind. Dies ist insbesondere für eine ältere und gesundheitsbewusste Klientel ein wichtiges Argument für einen Vertragsabschluss. Der InBody eignet sich hervorragend zum Einsatz bei Marketingveranstaltungen wie Gesundheitstagen in Firmen und öffentlichen Einrichtungen. Dem Mitarbeiter können aufgrund der Ergebnisse schnell Gesundheitsrisiken und körperliche Schwachstellen aufgezeigt werden, die dieser in Ihrer Anlage „wegtrainieren“ kann. In Verbindung mit einem kostenlosen Schnuppertrainingsgutschein können Sie den Interessenten leicht in Ihre Anlage locken.

**Vertriebspartner**

JP Global Markets GmbH  
Mergenthalerallee 55 – 59, 65760 Eschborn  
Tel.: 06196 – 7691665, Fax: 06196 – 7691611  
E-Mail: [erfolg@inbody.de](mailto:erfolg@inbody.de)  
[www.inbody.de](http://www.inbody.de)

## Neue Wege der BIA\*-Körperzusammensetzungsanalyse

\* BIA – Bioelektrische Impedanzanalyse